



## **ACCENTO vario von ZEISS**


Verbessern Sie Ihre stereoskopische Beobachtung



We make it visible.

# ZEISS ACCENTO vario

Als optionales Zubehör für die ZEISS Spaltlampe SL 130 verringert der ACCENTO® vario von ZEISS den stereoskopischen Winkel und verbessert so Ihre binokulare Beobachtung, z. B. bei der Untersuchung der Fundusperipherie und bei der Gonioskopie.

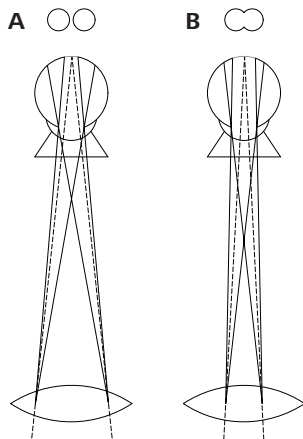

## Umfassenderer diagnostischer Einblick

Der kompakte ZEISS ACCENTO vario wird zwischen dem Frontobjektiv auf der Vorderseite und dem Vergrößerungswechsler angebracht. Er erlaubt eine komfortable Verringerung des stereoskopischen Beobachtungswinkels von  $12,5^\circ$  auf  $7^\circ$ . Der geringere Winkel sorgt für ein größeres Sehfeld und ermöglicht umfassendere Einblicke bei der diagnostischen Untersuchung.

## Einfache Bedienung

Durch die einfache Winkeleinstellung und die selbsterklärenden Symbole ist das Bedienkonzept des ZEISS ACCENTO vario leicht verständlich.

## Montiert ab Werk oder nachrüstbar

Der ZEISS ACCENTO vario ist für neue Spaltlampen SL 130 direkt ab Werk erhältlich. Er kann aber auch für bereits vorhandene Spaltlampen SL 130 nachgerüstet werden. Unsere regionalen Vertretungen helfen Ihnen gerne weiter.

## Funktionsprinzip

Mit dem ZEISS ACCENTO vario können Sie den stereoskopischen Beobachtungswinkel leicht zwischen  $12,5^\circ$  und  $7^\circ$  wechseln, wie schematisch dargestellt. Der größere Winkel (A) eignet sich ideal für die Betrachtung des vorderen Augenabschnitts mit höherer Apertur, der kleinere Winkel (B) für die verbesserte stereoskopische Beobachtung bei der Untersuchung der Fundusperipherie sowie bei der Gonioskopie.

